

## Handleiding opladen For-Motion met **Gel** accu's.

Dit betreft de standaard uitvoering met accu's op loodzuurbasis.

Voor u start, vergewis u ervan dat het contactslot uit staat!

### Acculader aansluiten

**STAP 1:** eerst de lader aansluiten op de connector aan het paneel onder de voorzijde van de zetel.

**STAP 2:** Steek daarna pas de stekker van de lader in het stopcontact !

### Acculader loskoppelen

**Stap 1:** Eerst de stekker uit het stopcontact verwijderen.

**Stap 2 :** Haal daarna pas de stekker uit het voertuig.

Als de accu is opgeladen de lader altijd loskoppelen, en voorkom dat de lader gedurende een lange periode (meer dan 4 uur na volledige oplading) aangesloten blijft. Nooit de accu's onbewaakt opladen.

Gel accu's gaan langer mee indien u ze indien mogelijk, zoveel mogelijk van vol naar leeg gebruikt, echter wel voorkomen dat ze meer dan 2 dagen onder de 50% zijn. Koude accu's hebben capaciteitsverlies, dus stal uw scooter bij voorkeur warm. Tijdens de winterstop is het juist goed de accu's vol geladen, en koud te bewaren, dan treedt er minder verval op.

Op Gel accu's zit 6 maanden garantie, indien deze accu's goed functioneren, is het uitgesloten dat de capaciteit heel plotseling terugloopt, dat kan alleen gebeuren door over-belading of te diepe en/of langdurige ontlading. Ik raad u daarom aan goed notie te nemen van bovenstaande gebruiksaanwijzing, zodat u de maximale levensduur van de accu's kan genieten.

Gebruik alleen de originele lader, andere laders kunnen de accu's beschadigen of zelfs brandgevaar opleveren.

Bij twijfel of vragen neemt u contact op met uw dealer of met For-Motion.NL